



VIDEO

Perfit

vatech

Perfit FS

EL PRIMER BLOQUE DE ZIRCONIO
TOTALMENTE SINTERIZADO DEL MUNDO.


vatech

Facebook: @vatechmx | Instagram: @vatechmexico | Youtube: @vatechmexico

T. +52 1 (55) 6585-2395



W. www.vatechmexico.com

E. contacto@vatechmexico.com

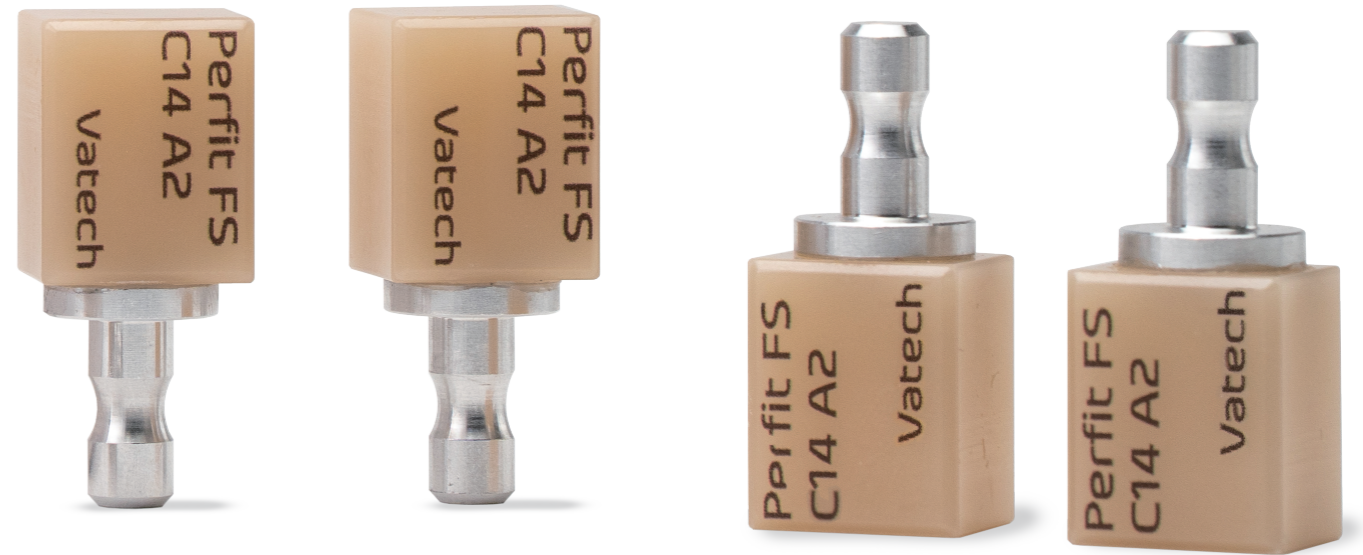


Máxima naturalidad

La estructura de 3 capas sin fisuras

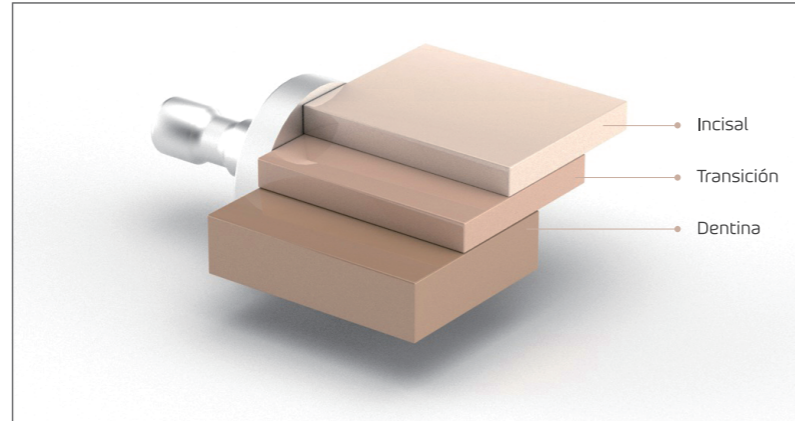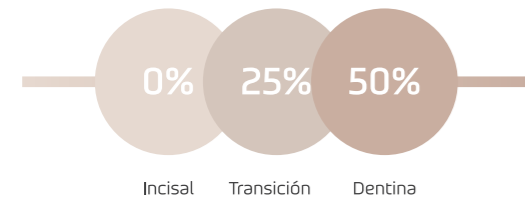

Flujo de trabajo rápido


Ahorra tiempo ya que no requiere cocción

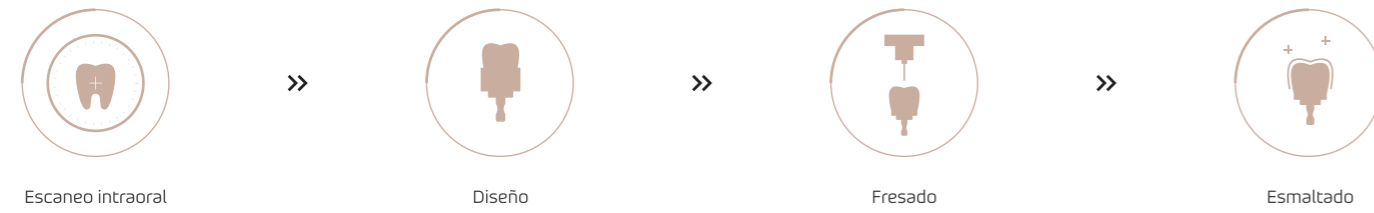

Alto nivel de resistencia al agrietamiento


Después de la prueba de resistencia a la indentación Vickers, con una carga de 10 kg.

En comparación con el disco de zirconia general convencional (3Y-TZP) y la vitrocerámica de vidrio, Perfit FS no muestra grietas aparentes que emanen de las esquinas de la hendidura de diamante, lo que indica su excepcional resistencia a la fractura de la indentación de diamante. En conclusión, las restauraciones de Perfit FS presentan una mayor resistencia a la fisuración que otros tipos de restauraciones que se muestran a continuación.

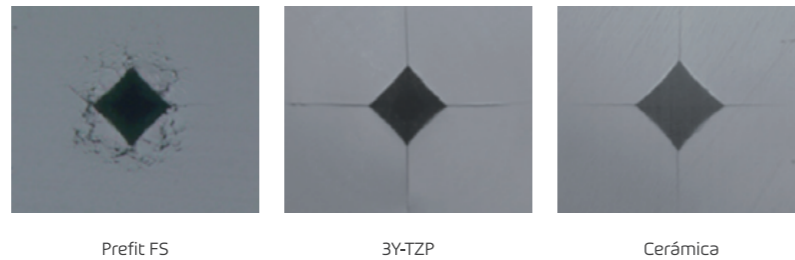

500 MPa, Alta resistencia a la flexión

Amplia gama de indicaciones

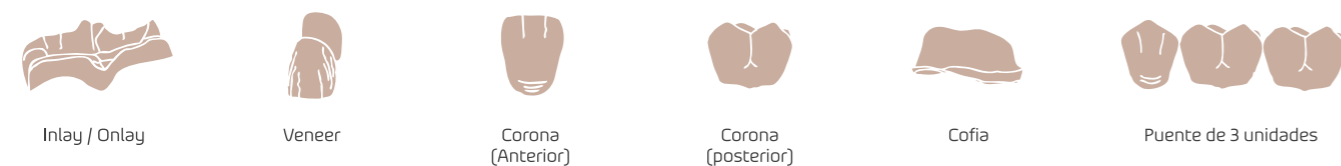

Preguntas Frecuentes

- Q ¿Perfit FS está hecho de zirconia?**
A Sí. Este producto está hecho de 100% zirconia.
- Q ¿Los bloques de Perfit FS requieren de un proceso de cocción?**
A No es necesaria la cocción, ya que los bloques de Perfit FS son totalmente cristalizados (sinterizados).
- Q ¿Cuántos tamaños hay disponibles?**
A Perfit FS está disponible en 4 tamaños:
- I12 (15.0 X 12.0 X 10.4)
 - C14 (18.0 X 14.0 X 12.7)
 - C16 (18.0 X 15.9 X 17.8)
 - B32 (32.0 X 15.1 X 15.1)
-
- Q ¿Qué fresadoras son compatibles con Perfit FS?**
A Fresadoras en húmedo de 4 o 5 ejes que puedan fresar bloques de vitrocerámica.
 *Antes de utilizar Perfit FS, se necesita que el soporte técnico de su fresadora compruebe la técnica de fresado, incluyendo la herramienta y el sistema CAM.
- Q Fresadoras disponibles**
- | Fresadora | S/W | Vida útil de la herramienta |
|--|-----------------------|--|
| Imes-icore
- CORITEC One/One+
- CORITEC 150i pro | Millbox
hyperDENT | Más de 20 unidades
(Fresa personalizada para Perfit) |
| Dentsply Sirona
- CEREC MC X
- CEREC MC XL
- CEREC Primemill
- inLab MC XL | inLab S/W
Cerec SW | 25 bloques (Fresa puntiaguda)
12 bloques (Fresa escalonada) |
| Roland DG
-DXW-42W | MillBox | Más de 20 unidades
(Fresa personalizada para Perfit) |
- Q ¿Es posible teñir Perfit FS?**
A Perfit FS se puede teñir y glasear utilizando varios fabricantes.
- Q ¿Es posible pulir la superficie de Perfit FS?**
A No se recomienda el pulido de alto brillo ya que puede disminuir la resistencia y estética en comparación con el glaseado.

